



Produktinformation

Kältespray CLASSIC



Eigenschaften

- Austrittstemperatur < -40°C
- Verdampft sofort und rückstandsfrei
- Geruchsneutral oder in angenehmen Geruchsvarianten
- Präzises Aufsprühen durch Applikationsröhrchen
- Sparsam durch Spezialventil
- als Medizinprodukt der Klasse I zugelassen

Präparate-Typ

Aerosol zur extraoralen Anwendung.

Anwendungsbereiche

Kälte Spray eignet sich zum schnellen Vereisen von Schaumstoffpellets, zur Vitalitätsprüfung von Zähnen im Dentalbereich und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien wie z. B. Hydrokolloid etc.

Hinweise zur Anwendung

Den zu kühlenden Gegenstand aus einer Entfernung von ca. 2-3cm für 1-2sec. einsprühen. Nicht direkt im Mund anwenden, Vereisungsgefahr! Nur draußen oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Sicherheitshinweise

H 222 - H 229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren..



Gefahr



Gutachten

Unsere Produkte sind nach den neuesten Methoden wissenschaftlich untersucht und getestet. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage Kopien unserer Gutachten zu.

Optimales Etikettenmaß

(Breite x Höhe)

- 200ml 155 x 120 mm

Kontakt

PRISMAN GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch
Germany

Tel.: +49 06251/ 866980-0
Fax: +49 06251/ 866980-77

www.prisman.de
info@prisman.de

Diese Produktinformation wurde erstellt und freigegeben basierend auf dem Masteretikett:

ZA01 Masteretikett Kälte Spray CLASSIC KS_A und KS_B_Rev.01.doc

Freigabe

Lorsch, 02.04.2020

Ort, Datum

A. St

Mitarbeiter Regulatory Affairs

Regulatory Affairs