

	Gebrauchsanweisung	Stand: 2022-11-10
	DIAHART	Rev. 1

Diahart

Kalttauchhärter für Modellgusseinbettmassen
bei Gel-Dublierung

Diahart ist ein dünnflüssiger, gut einziehender Kalttauchhärter auf Alkohol/Harz –Basis. Es wird verwendet zum Oberflächenhärten von Einbettmassenmodellen, beim Arbeiten mit Gel-Dublierung (Agar- Basis). Außerdem vermittelt Diahart eine Oberflächenhaftbarkeit des Waches beim Modellieren auf dem Einbettmassenmodell.

Verarbeitung

Diahart sollte bei Zimmertemperatur verarbeitet werden 18°C - 24°C

Trocknen der Modelle: Im Trockenschrank bei 200°C - 220°C ca. 45 Minuten.

Härten der Modelle: 1 x 4 sek. oder 2 x 2 sek.
danach Diahart gut abfließen lassen.

Wichtig: Das in Diahart getauchte Einbettmassenmodell, darf danach in gar keinem Fall in den Ofen zurückgestellt werden.
Diahart in einen geeigneten verschließbaren Behälter füllen, wegen der Verdunstung und der Leichtendzündlichkeit

Varianten / Packungsgrößen

DIAHART 1 L Art.-Nr. 02-0025

Sonstiges

Achtung: Diahart ist Feuergefährlich und leichtendzündlich

Entsorgung: Verbrauchter Tauchhärter muss bei der örtlichen Chemikalien,- Sondermüllsammmlung abgegeben werden.
Der VK-Preis enthält keine Zurücknahme / Entsorgungskosten.



Dental Kontor GmbH
Amalienstr. 62
46537 Dinslaken

Tel.: 02064 625930
Fax: 02064 6259380
www.dentalkontor.de