	Gebrauchsanweisung	Stand: 2021-02-01
	Polibims + Polibims Anmischliquid	Rev. 1

Polibims

Polibims ist ein Poliermittel speziell für Kunststoffprothesen und wird wie Bimssteinpulver angewendet. Es ist geruchsneutral, poliert 30% schneller (gegenüber herkömmlichem Bimsstein) und ist dabei superglättend. Durch das geringere spezifische Gewicht entsprechen 8kg Polibims ca. 20kg Bimssteinpulver.

Polibims Anmischliquid plus

Polibims Anmischliquid ist gebrauchsfertig und wird wie Wasser angewendet. Es ist speziell auf Polibims und Bimssteinpulver in der Dentaltechnik abgestimmt. Natürliche Duftstoffe verleihen dem Liquid einen frischen Apfelgeruch. Die angemischte Poliermasse ist stabil gegenüber mikrobiellem Befall und sorgt so für keimfreies Arbeiten (Polibims Anmischliquid plus ist kein Biozid/Desinfektionsmittel). Durch Anmischliquid bleibt die Poliermasse länger feucht und kann dadurch länger verwendet werden. Das leicht ölige Polibims Anmischliquid plus macht die Poliermasse noch cremiger.

Verarbeitung

Im Poliertrog wird Polibims Anmischliquid plus oder Wasser vorgelegt und mit Polibims oder Bimssteinpulver aufgefüllt bis ein Breigemisch entsteht. Diese Poliermasse kann frei bis zur gewünschten Konsistenz angerührt werden. Der Brei sollte aber möglichst so cremig sein, dass er zwischen den Fingern durchläuft. Dadurch ist eine gewisse Haftung auf dem zu polierenden Objekt gewährleistet.

Es ist darauf zu achten, dass die zu polierenden Oberflächen immer wieder mit dem feuchten Breigemisch benetzt werden, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Zur Politur können handelsübliche Bürsten verwendet werden. Meist reichen Ziegenhaarbüsten aus, um eine starke Abrasion von unebenen Stellen und gleichzeitig eine äußerst glatte Oberfläche zu erzeugen. Wir empfehlen Polierbürsten mit zusätzlicher Leinen- oder Vlieseinlage.


Nun kann wie gewohnt die Glanz- und Hochglanzpolitur vorgenommen werden.

Varianten / Packungsgrößen

Polibims Poliermittel (4 x 2 kg)	8 kg	Art.-Nr. 05-0021
Polibims Poliermittel	10 kg	Art.-Nr. 05-0019
Polibims Anmischliquid plus	5 l	Art.-Nr. 26-0305

Sonstiges

Die Empfehlungen dieser Gebrauchsanweisung basieren auf dem heutigen Stand der Technik und sind nach unserem Kenntnisstand / unseren Erfahrungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt als korrekt anzusehen. Für die Verwendung und Verarbeitung ist der Benutzer selbst verantwortlich. Sollten dennoch Schadensersatzansprüche auf Grund unserer Empfehlungen geltend gemacht werden, so bezieht sich dieser nur auf den gelieferten Warenwert.

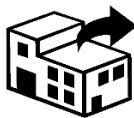

Dental Kontor GmbH
Amalienstr. 62
46537 Dinslaken
Tel.: 02064 625930
Fax: 02064 6259380
www.dentalkontor.de